

Instrukce k použití



CHRÁNIČ ÚST 1 BARVA



Technické informace

Horní a spodní měkká dvojitá vrstva fólie, snadno tvarovatelná a závěrečně opracovatelná, vyrobená z ethylenvinylacetátu (EVA). K jejímu zpracování doporučujeme jeden z našich modelů přístrojů pro tepelné tvarování [B-FORM® termoform](#).

PRODUKT URČENÝ K PROFESIONÁLNÍMU POUŽITÍ

Použití

- Měkká fólie pro profesionální sportovní chrániče zubů
 - Pozicionér.
 - Podpora frontálního skusu.
 - Snímatelný nákus.
-

Tvarování za tepla

- Vyrobit kvalitní sádrový model s použitím tvrdé sádry nebo kvalitní 3D prykyřice.
- Sádrový model by neměl být příliš vysoký a proto by měl být co nejvíce ztenčený. Základna modelu musí být vyhlazena. Odstranit ty části, které by mohly bránit samotnému tvarování (vestibulárně, bukální plocha). Opatrně odstranit podsekřiviny a zahladit ostré okraje sádry.
- Model z prykyřice vytištěný na 3D tiskárně se doporučuje vyrobit co možná nejnižší a do tvaru podkovy (ve tvaru U).
- Během tvarování za tepla dojde vždy k ztenčení materiálu ve srovnání s originální fólií. Obecně řečeno, u každého cm výšky modelu dochází ke ztenčení fólie o 20 %.

Proto je důležité snížit co nejvíce výšku modelu, nebo ho zanořit do misky s ocelovým granulátem a ponechat vyčnívat pouze tu část, na kterou se bude fólie tvarovat.

- Nahřejte fólii na teplotu a po dobu uvedenou v sekci " [teploty a časy](#) "
- Přiklopte upínací desku přístroje B-FORM® dokud fólie nepřekryje celý sádrový nebo 3D model.
- Aktivujte vakuum a během několika málo sekund docílíte výlisku.
- Nechte výlisek zchladit než ho sejmete z modelu.
- Pro usadnění nastříhnete fólii pomocí nůžek a [fréz](#) GHOST [ALIGNER®](#) co možná nejbliže u okraje modelu.
- Při denním používání fólie pacientem je doporučeno fólii denně dezinfikovat přípravkem [Gel SPORISAN®](#).

Tloušťka a formát

Fólie je k dispozici v následujících formátech a tloušťkách:

HRANATÁ
125 x 125 mm

KULATÁ
Ø 120 mm

KULATÁ
Ø 125 mm

#1941 - Tloušťka 4 mm - 12 kusů
Barva : Různé
UDI-DI = 8057509250643

#1941R - Tloušťka 4 mm - 12 kusů
Barva : Různé
UDI-DI = 8057509250650

#1941T - Tloušťka 4 mm - 12 kusů
Barva : Různé
UDI-DI = 8057509250667

#1956 - Tloušťka 4 mm - 12 kusů
Barva : Čirá
UDI-DI = 8057509250674

#1957 - Tloušťka 4 mm - 12 kusů
Barva : oranžová
UDI-DI = 8057509250681

#1958 - Tloušťka 4 mm - 12 kusů

Barva : Žlutá

UDI-DI = 8057509250698

#1960 - Tloušťka 4 mm - 12 kusů

Barva bílá _

UDI-DI = 8057509250711

#1961 - Tloušťka 4 mm - 12 kusů

Barva : zelená

UDI-DI = 8057509250728

#1962 - Tloušťka 4 mm - 12 kusů

Barva : Černá

UDI-DI = 8057509250735

#1963 - Tloušťka 4 mm - 12 kusů

Červená barva _

UDI-DI = 8057509250742

#1964 - Tloušťka 4 mm - 12 kusů

Barva : modrá

UDI-DI = 8057509250759

#1965 - Tloušťka 4 mm - 12 kusů

Barva : Fialová

UDI-DI = 8057509250766

#1966 - Tloušťka 4 mm - 12 kusů

Barva : růžová

UDI-DI = 8057509250773

Teploty a časy

Níže jsou uvedeny teploty a časy doporučené pro optimální výsledky tepelného tvarování.

- Tloušťka 4 mm - **82 C°** nebo **157 sekund**

POZNÁMKA: Teploty a časy jsou pouze přibližné a jsou počítané při použití přístroje pro tepelné tvarování fólií B-FORM®. Doporučujeme časy a teploty vhodně upravit podle vaší potřeby.

Symboly



Varování

V případě vážné nehody kontaktujte:

- **BART MEDICAL SRL** - Telefon: +39 0544 523326 - E-mail: sales@bartmedical.com

Výrobce



BART MEDICAL SRL

Viale Vincenzo Randi 118

48124 Ravenna (RA)+39 0544 523326, sales@bartmedical.com www.bartmedical.com

Podpora

Pro další informace a technickou podporu nás prosím kontaktujte e-mailem na sales@bartmedical.com