

Návod k použití



MOUTHGUARD 2 BAREVNÝ



Technické informace

Horní a spodní měkká dvojitá vrstva fólie, snadno tvarovatelná a závěrečně opracovatelná, vyrobená z ethylenvinylacetátu (EVA). K jejímu zpracování doporučujeme jeden z našich modelů přístrojů pro tepelné tvarování [B-FORM® termoform](#).

PRODUKT URČENÝ K PROFESIONÁLNÍMU POUŽITÍ

Použití

- Měkká fólie pro profesionální sportovní chrániče zubů
 - Pozicionér.
 - Podpora frontálního skusu.
 - Snímatelný nákus.
-

Tvarování za tepla

- Vyrobit kvalitní sádrový model s použitím tvrdé sádry nebo kvalitní 3D prykyřice.
- Sádrový model by neměl být příliš vysoký a proto by měl být co nejvíce ztenčený. Základna modelu musí být vyhlazena. Odstranit ty části, které by mohly bránit samotnému tvarování (vestibulárně, bukální plocha). Opatrně odstranit podsekřiviny a zahladit ostré okraje sádry.
- Model z prykyřice vytištěný na 3D tiskárně se doporučuje vyrobit co možná nejnižší a do tvaru podkovy (ve tvaru U).
- Během tvarování za tepla dojde vždy k ztenčení materiálu ve srovnání s originální fólií. Obecně řečeno, u každého cm výšky modelu dochází ke ztenčení fólie o 20 %. Proto je důležité snížit co nejvíce výšku modelu, nebo ho zanořit do misky s ocelovým granulátem a ponechat vyčnívat pouze tu část, na kterou se bude fólie tvarovat.



- Nahřejte fólii na teplotu a po dobu uvedenou v sekci " [teploty a časy](#) "
 - Přiklopte upínací desku přístroje B-FORM® dokud fólie nepřekryje celý sádrový nebo 3D model.
 - Aktivujte vakuum a během několika málo sekund docílíte výlisku.
 - Nechte výlisek zchladit než ho sejmete z modelu.
 - Pro usnadnění nastřihněte fólii pomocí nůžek a [fréz](#) GHOST [ALIGNER®](#) co možná nejbliže u okraje modelu.
 - Při denním používání fólie pacientem je doporučeno fólii denně dezinfikovat přípravkem [Gel SPORISAN®](#) .
-

Tloušťka a formát

Fólie je k dispozici v následujících formátech a tloušťkách:

HRANATÁ
125 x 125 mm

KULATÁ
Ø 120 mm

KULATÁ
Ø 125 mm

#1967 - Tloušťka 4 mm - 12 kusů

Barva: Různé

UDI-DI = 8057509250780

#1967R - Tloušťka 4 mm - 12 kusů

Barva: Různé

UDI-DI = 8057509250797

#1967T - Tloušťka 4 mm - 12 kusů

Barva: Různé

UDI-DI = 8057509250803

#1968 - Tloušťka 4 mm - 12 kusů

Barva: zelená / modrá

UDI-DI = 8057509250810

#1969 - Tloušťka 4 mm - 12 kusů

Barva: černá/ bílá

UDI-DI = 8057509250827

#1970 - Tloušťka 4 mm - 12 kusů
Barva: modrá / červená
UDI-DI = 8057509250834

#1971 - Tloušťka 4 mm - 12 kusů
Barva: černá/ žlutá
UDI-DI = 8057509250841

#1972 - Tloušťka 4 mm - 12 kusů
Barva: černá / červená
UDI-DI = 8057509250858

#1973 - Tloušťka 4 mm - 12 kusů
Barva: fialová / žlutá
UDI-DI = 8057509250865

#1974 - Tloušťka 4 mm - 12 kusů
Barva: hnědá/ žlutá
UDI-DI = 8057509250872

#1975 - Tloušťka 4 mm - 12 kusů
Barva: Modrá / Žlutá
UDI-DI = 8057509250889

#1976 - Tloušťka 4 mm - 12 kusů
Barva: červená / bílá
UDI-DI = 8057509250896

#1977 - Tloušťka 4 mm - 12 kusů
Barva: oranžová/ bílá
UDI-DI = 8057509250902

#1978 - Tloušťka 4 mm - 12 kusů
Barva: Modrá / Bílá
UDI-DI = 8057509250919

#1979 - Tloušťka 4 mm - 12 kusů
Barva: modrá / oranžová
UDI-DI = 8057509250926

#1980 - Tloušťka 4 mm - 12 kusů
Barva: zelená/ žlutá
UDI-DI = 8057509250933

#1981 - Tloušťka 4 mm - 12 kusů
Barva: černá / oranžová
UDI-DI = 8057509250940

#1982 - Tloušťka 4 mm - 12 kusů

Barva: Bílá / Fialová

UDI-DI = 8057509250957

#1983 - Tloušťka 4 mm - 12 kusů

Barva: zelená/ bílá

UDI-DI = 8057509250964

#1984 - Tloušťka 4 mm - 12 kusů

Barva: červená / žlutá

UDI-DI = 8057509250971

Teploty a časy

Níže jsou uvedeny teploty a časy doporučené pro optimální výsledky tepelného tvarování.

- Tloušťka 4 mm - **82 C°** nebo **157 sekund**

POZNÁMKA: Teploty a časy jsou pouze přibližné a jsou počítané při použití přístroje pro tepelné tvarování fólií B-FORM®. Doporučujeme časy a teploty vhodné upravit podle vaší potřeby.

Symboly



Varování

V případě vážné nehody kontaktujte:

- **BART MEDICAL SRL** - Telefon : +39 0544 523326 - E-mail: sales@bartmedical.com

Výrobce



BART MEDICAL SRL

Viale Vincenzo Randi 118

48124 Ravenna (RA)+39 0544 523326sales@bartmedical.comwww.bartmedical.com

Podpora

Pro další informace a technickou podporu nás prosím kontaktujte e-mailem na sales@bartmedical.com