

Quicklear®

Návod k použití keramické zámky sl

Návod k použití

Popis: FORESTADENT QuickKlear® jsou samoligovací rovnátka.

Zamýšlené použití: Zámky jsou upevňovací prvky fixních ortodontických aparátů pro vyrovnaní zubů nebo korekci okluze při ortodontické léčbě přirozených zubů.

Populace pacientů: Dospívající a dospělí, kteří potřebují ortodontickou léčbu.

Indikace: Malokluze, špatně umístěné, špatně zarovnané zuby.

Kontraindikace: QuickKlear® se nesmí používat, pokud ošetřující lékař považuje použití výrobků za nebezpečné pro pacienta a pokud je známa alergie na jednu nebo více složek.

Klinický přínos: Rovnátka QuickKlear® se používají jako součást fixního aparátu k nápravě špatně postavených zubů.

Aplikace: Před léčbou musí být pacient informován o hygienických opatřeních, která je třeba dodržovat, a o rizicích spojených s ortodontickou léčbou. Výběr systému rovnátek a technických hodnot musí být proveden lékařem na základě lékařské nutnosti a návodu k použití / specifikací na etiketě. Ujistěte se, že byl správně vybrán systém rovnátek podle zamýšleného ošetření a že sklovina není poškozena, aby nedošlo k jejímu poškození při odlepování. Při umísťování rovnátek dbejte na to, aby nedošlo ke kontaktu s odpovídajícím zubem v protějščí čelisti. K nalepení rovnátka můžete použít jakékoliv komerčně dostupné lepidlo na rovnátka. Postupujte podle pokynů výrobce adheziva. Pro odstranění použijte vhodný nástroj pro odstraňování závitů (např. C501-0816 / C501-0828).

Zamýšlení uživatelé: Výrobky mohou používat pouze vyškolení ortodontisté.

Materiál: QuickKlear® jsou vyrobeny z polykrystalické keramiky s oxidem hliníku. Uzavírací prvek je vyroben ze slitiny kobaltu, chromu a niklu. Další podrobnosti o složení naleznete v seznamu materiálů v aktuálním katalogu FORESTADENT.

Skladování / manipulace: Výrobky musí být skladovány a musí se s nimi manipulovat tak, aby nedošlo ke kontaminaci neznámou látkou. Výrobky se nesmí znovu zpracovávat a používat na pacientech. Oddělování, opětovné zpracování a opakované použití může vést k nepředvídatelným změnám vlastností výrobku, jako je rozměrová stabilita a zachování tvaru.

Odstranění a likvidace: Po ukončení léčby lékař zařízení odstraní. Likvidace musí být provedena v souladu s regionálními nebo národními právními požadavky na materiály z klinické praxe.

Upozornění a bezpečnostní opatření: Rovnátko by se neměla nasazovat na poškozené povrchy zubů nebo zuby s existující resorpcí kořenů, což platí i pro záněty nebo podobná onemocnění dutiny ústní.



V případě známé nesnášenlivosti a možných alergických reakcí na složky se držák nesmí používat. Návod k použití poskytuje pouze informace o správném použití výrobků.



Pokud se objeví komplikace, proveďte vhodná protipatření, např.: odstraňte přípravek a v případě potřeby zvolte alternativní metody léčby.



Během používání dbejte na to, aby nedošlo ke spolknutí nebo vdechnutí volných částí.




Před vyšetřením MRI informujte radiologa (možné artefakty, zahřívání, zbytkový magnetismus).

Pokyny k povinnému hlášení: Závažné události, ke kterým došlo v souvislosti s výrobkem, musí být hlášeny výrobcí a příslušnému státnímu orgánu.

Symbole použití

	Upozornění		Číslo výrobní šarže
	Evropská shoda (NB 0297)		Datum výroby
	Zdravotnický prostředek		Výrobce
	Dodržujte návod k použití		Jedinečný identifikátor zařízení
	Nepoužívejte opakovaně		Obsahuje nikl
	Obj. č.		

CE 0297 93/42/EWG

 FORESTADENT Bernhard Förster GmbH
Westl. Karl-Friedrich-Str. 151 · 75172 Pforzheim · Germany
Telefon + 49 72 31 459-0 · Fax + 49 7231 459-102
www.forestadent.com · info@forestadent.com

 **FORESTADENT**[®]
GERMAN PRECISION IN ORTHODONTICS