

# ORTH *easy*

## Abutment Pal



1299-1004

Abutment OrthoEasy® Pal je vyroben z nerezové oceli (1.4305, X8CrNiS18-9) a byl speciálně vyvinut pro použití s ortodontickým minišroubem OrthoEasy® Pal.

Podrobnosti o použití miniaturních šroubů OrthoEasy® Pal naleznete v příslušném návodu k použití.

V této souvislosti slouží abutment OrthoEasy® Pal k následujícím účelům:

- Krytí minišroubu OrthoEasy® Pal po zavedení.

- Upevnění ortodontických aparátů na minišroub OrthoEasy® Pal přivařením aparátu k abutmentu.

Abutment OrthoEasy® Pal se dodává nesterilní. Parní sterilizaci lze provést pomocí frakcionovaného vakuového procesu při teplotě 134 °C, době udržování 5 minut a době sušení nejméně 20 minut.

Varování:

- Obsahuje nikl.
- Abutment OrthoEasy® Pal může být pouze používat s minišrouby OrthoEasy® Pal a odpovídajícím originálním příslušenstvím FORESTADENT. Ten byl při vývoji a výrobě koordinován. Použití výrobků jiných výrobců může vést k nepředvídatelným rizikům, a proto se nedoporučuje.

CE 0297 93/42/EWG

- Obecně lze používat pouze čisté a/nebo sterilizované výrobky.
- Abutment OrthoEasy® Pal je určen k jednorázovému použití. Již použitý abutment se nesmí používat opakovaně, protože základní vlastnosti výrobku se mohou během doby používání změnit tak, že dojde k narušení jeho funkce.

Pro společné použití s produkty	Ref.-č.
OrthoEasy® Pal	1201A2308
OrthoEasy® Pal sterilní	1201S2308
OrthoEasy® Pal upevňovací šroub	1299-1003
Čepel pro OrthoEasy® Pal upevňovací šroub	1299-1006



Výrobce



Datum výroby

LOT

Číslo výrobní šarže, šarže

REF

Číslo položky



Nepoužívejte opakovaně



Postupujte podle návodu k použití



Upozornění - dodržujte průvodní dokumenty



Nesterilní



Obsahuje nikl

ZDRUCK293|06/2021

**FORESTADENT**  
GERMAN PRECISION IN ORTHODONTICS

Bernhard Förster GmbH

Westl. Karl-Friedrich-Str. 151 · D-75172 Pforzheim

Telefon +49 (0) 7231 459-0 · Fax +49 (0) 7231 459-102

info@forestadent.com · www.forestadent.com