

# ORTH easy

## Přidržený šroub Pal



Fixační šroub OrthoEasy® Pal je vyroben z nerezové oceli (1.4305, X8CrNiS18-9) a byl speciálně vyvinut pro použití s ortodontickým minišroubem a abutmentem OrthoEasy® Pal.

**Podrobnosti o použití minišroubů OrthoEasy® Pal naleznete v příslušném návodu k použití.**

V této souvislosti slouží upevňovací šroub OrthoEasy® Pal k následujícím účelům:

- Připevnění abutmentu OrthoEasy® Pal - se svary nebo bez nich - k minišroubu OrthoEasy® Pal.

Upevňovací šroub OrthoEasy® Pal se dodává nesterilní. Parní sterilizaci lze provést pomocí frakcionovaného vakuového procesu při teplotě 134 °C, době udržování 5 minut a době sušení nejméně 20 minut.

### Varování:

- Obsahuje nikl.
- Přidržený šroub OrthoEasy® Pal lze používat pouze s mini šrouby OrthoEasy® Pal a odpovídajícím originálním příslušenstvím od společnosti FORESTADENT. Ty byly při vývoji a výrobě koordinovány. Použití produktů jiných výrobců může vést k nepředvídatelným rizikům, a proto se nedoporučuje.

- Obecně lze používat pouze čisté a/nebo sterilizované výrobky.
- Držák OrthoEasy® Pal je určen k jednorázovému použití. Již použité opěrné šrouby se v žádném případě nesmí používat opakovaně, protože základní vlastnosti výrobku se mohou v průběhu používání změnit tak, že opakované použití může vést ke ztrátě funkčnosti.
- Maximální utahovací moment pro upevňovací šroub OrthoEasy® Pal je 10 Ncm. Uložení upevňovacího šroubu OrthoEasy® Pal je třeba pravidelně kontrolovat, zda není uvolněný, a v případě potřeby jej znovu utáhnout silou 10 Ncm.
- Přidržený šroub OrthoEasy® Pal je vybaven pojistkou, která drží šroub na čepeli pro přidržený šroub OrthoEasy® Pal. Díky vestavěné bezpečnostní funkci upevňovacích šroubů OrthoEasy® Pal se může stát, že čepel pro upevňovací

šroub OrthoEasy® Pal po zašroubování silou 10 Ncm zapadne do šroubu. Opatrným pohybem tam a zpět ji lze snadno uvolnit. Z tohoto důvodu podléhá čepel pro upevňovací šroub OrthoEasy® Pal určitému opotřebení. Před použitím je proto nutné zkontrolovat, zda je upevňovací šroub stále bezpečně připevněn k čepeli. Pokud tomu tak není, je třeba jej neprodleně vyměnit.



Výrobce



Datum výroby



Číslo výrobní šarže, šarže



Číslo položky



Nepoužívejte znovu



Postupujte podle návodu k použití



Upozornění - dodržujte průvodní dokumenty



Nesterilní

CE 0297 93/42/EWG

### Pro společné použití s produkty

Ref.-č.

OrthoEasy® Pal	1201A2308
Abutment OrthoEasy® Pal	1299-1004
Čepel pro OrthoEasy® Pal upevňovací šroub	1299-1006

ZDRUCK294|03/2019

**FORESTADENT**  
GERMAN PRECISION IN ORTHODONTICS

Bernhard Förster GmbH  
West. Karl-Friedrich-Str. 151 · D-75172 Pforzheim  
Telefon +49 (0) 7231 459-0 · Fax +49 (0) 7231 459-102  
info@forestadent.com · www.forestadent.com