
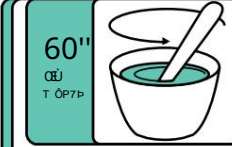
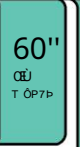







æ\* ā | á^|^} ÆÏ|^|^}

		TYP I rychle	TYP II normální
			
	20 ml. + 10,5 g. 1 x 1 x	60" ČÚ T ŐP7P	60" ČÚ T ŐP7P
	40 ml. + 21 g. 2 x 2 x	1'50" PRACOVNÍ ČAS včetně míchání	2'50" PRACOVNÍ ČAS včetně míchání
	1 2	2'00" POČÁTEČNÍ NASTAVENÍ ČÚV včetně práce	3'00" POČÁTEČNÍ NASTAVENÍ ČÚV včetně práce
			
		60" v ústech	

Měření byla provedena při 23 °C s deionizovanou vodou.

TYP I: RYCHLÉ ZÚČŮX7P - TYP II: NORMÁLNÍ ZÚČŮX7P

Nevyžaduje se žádná specifická předúprava. Respektujte poměr prášek/voda. Prášek nasype do vody, důkladně promíchejte a pracujte v souladu s deklarovanými časy (\*) měřenými pomocí deionizované vody při 23°C. Při použití specifických mechanických míchadel pro otiskovací hmoty na bázi alginátu postupujte podle pokynů výrobce. Doba zpracování a počáteční doba tuhnutí se mohou lišit v závislosti na poměru prášek/voda, teplotě a/nebo tvrdosti vody, rychlosti míchání a/nebo tření. Umyjte, opláchněte, protřeptejte, vydezinfikujte otisk (doporučujeme specifické dezinfekční prostředky na alkoholové bázi ve spreji) a nalijte model. Doporučené omítky: Kromotypo 3, Singletypo 3, Kromotypo 4, Singletypo 4, Ortotypo.

VAROVÁNÍ: Používejte masku, brýle, rukavice a ochranný oděv. Přestože je „bez prachu“, dávejte pozor, abyste nevdechovali prach. V případě kontaktu s očima důkladně omyjte vodou. Po každém odběru sáček ihned uzavřete. Skladujte na suchém a chladném místě. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti. Nepoužívat u pacientů alergických na mátovou příchut'. Jakékoli vážné incidenty související s produktem musí být hlášeny společnosti Lascod a příslušnému orgánu.

členského státu, ve kterém je uživatel usazen.

Čistá hmotnost: 450g. - Čistý objem po smíchání: 1250 ml.