

Tender Repair

Návod na použití

Doporučujeme použít koferdam. Zdrsnit povrch keramického nebo kovového povrchu brouskem. Alternativou je zdrsnění povrchu pomocí intraorálního pískovače. Po očištění ofouknout vzduchem bez příměsi oleje, aby byl povrch zbaven vody. Povrch musí být důkladně vysušený (pro zachování vysoké odolnosti bondu).

Okamžitě po očištění a osušení nanést štětečkem na keramický nebo kovový povrch tenkou vrstvu Tender Bond Metal Primer. Vrstva by neměla být příliš vlhká nebo nerovnoměrná. Vysušit vzduchem po dobu 1-2 min. Kovový povrch pokrýt Tender Paste Opaque Light, velmi tenkou vrstvou, a polymerovat halogenovou nebo LED lampou (600mW/cm² minimální účinný výkon), po dobu 40-90 sek. v závislosti na síle výkonu jednotky. Touto vrstvou je nutné zajistit optimální zakrytí celého kovového povrchu.

Poté aplikovat tenkou vrstvu Tender Paste Opaque Clear na keramiku a polymerovat halogenovou nebo LED polymerační lampou (600mW/cm² minimální účinný výkon), po dobu 40-90 sek. v závislosti na síle výkonu jednotky. Tato vrstva je nutná pro docílení optimálního bondingu na keramiku. Aplikujte kompozit vrstvicí technikou a polymerujte.

Dokončit a vyleštit.

UPOZORNĚNÍ: pracovní povrch musí být důkladně vyčištěn a zbaven jakýchkoliv zůstatků mastnot a po leštění. Opákní vrstva musí být velmi tenká. Pokud by byla silnější, zabrání tím optimální polymeraci a došlo by k oslabení bondu.

Pracovní doba: 1 minuta (při delší době více než 1 min. by mohlo dojít ke snížení odolnosti vazby)

Skladování: <25°C. Uzavřít důkladně stříkačku po použití a chránit před přímým světlem.
Nepoužívat po době expirace.

Vedlejší účinky: velmi vzácné.

Kontraindikace/Interakce: nepoužívat v případě známé přecitlivělosti pacienta na některou z uvedených složek. Sdělte zubnímu lékaři výše uvedené informace pro možnou interakci s léčivými a jinými materiály přítomnými v ústech pacienta.

MICERIUM S.p.A. Via Marconi, 83 – 16036 Avegno (Ge) – Italy
Tel. +39 0185 7887870 – Fax +39 0185 7887970



VELMI DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Povrchy konstrukce by měly být očištěny od všech zbytků mastnoty a leštění.

- Po aplikaci Primeru osušit vzduchem na 1-2 min.: aplikujte opákní pastu pouze pokud je povrch kompletně suchý.

- Opákní pasta by měla být aplikovaná pouze ve velmi tenkých vrstvách podobných mycímu prostředku. Pokud jsou vrstvy silnější, brání optimální polymeraci a zeslabují tím vazbu.

- Po aplikaci opákní pasty polymerujte každou vrstvu halogenovou lampou nebo LED polymeračním zařízením pro použití ve stomatologii (600mW/cm² minimální efektivní výkon), v závislosti na výkonu používaného zařízení.

Výkon polymerace vyšší než 600 mw - 90 sek.

Výkon polymerace vyšší než 800 mw - 60 sek.

Výkon polymerace vyšší než 1000 mw - 40 sek.

- Doporučeno je nanést dvě vrstvy opákní pasty.

- Uzavírejte stříkačku do minuty od jejího otevření.