

(CS) OPAKOVANÉ POKYNY PRO POUŽITÍ ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ (ISO EN 17664)

Zařízení : Kyrety a ostatní pomůcky ústní hygieny, kroužky a matricové nástroje, všechny aplikační nástroje na kompozita určené pro opakované použití, které dodává MICERIUM SPA včetně také kovové setů s pryžovými nebo plastovými díly, s výjimkou těch s dřevěnými rukojeťmi (které nelze sterilizovat) u kterých je možná pouze dezinfekce. _ Poznámka: Dřevěné rukojeti jsou rozpoznatelné barevnými nátěry modré a bílé.

VAROVÁNÍ Nepřekračujte teplotu 121 °C pro pryžové / plastové hroty .

Omezení k opakovaným procesům

Opakování procesů má minimální účinek na tyto nástroje a jeho kovové části. Gumové části se opotřebovávají po 10 cyklech.

POKYNY

Místo použití : Odstraňte zbytky pod tekoucí vodou.

Kontejnery: Nejsou žádné požadavky.

Přeprava : Doporučuje se nástroje co nejdříve po použití zpracovat.

Příprava na čištění: Žádná konkrétní indikace. Pouze pro pryžové a plastové špičky: sejměte pryžovou špičku a odšroubujte plastovou špičku od kovové rukojeti.

Automatická myčka: ultrazvukové zařízení typu Biosonic s obecnou kapalinou typ UC30. Mohou být rovněž použity dezinfekční prostředky určené pro ultrazvuk (v souladu s instrukcemi výrobce a validované pro dentální nástroje), ale jen pro kovové nástroje (ne dřevo, plast nebo silikon).

1. Vložit nástroje do koše určeného pro nástroje, hroty do skleničky.
2. Spustit cyklus minimálně na **15** minut.
3. Při vyjmutí zkontrolovat čistotu a zda byly úplně odstraněny viditelné nečistoty. V případě potřeby opakujte cyklus nebo vyčistěte manuálně.

Ruční mytí: čisticí prostředek (líh), jednorázový hadřík , tekoucí voda.

Postup:

1. Opláchněte zbytky z nástrojů.
2. Hadříkem na jedno použití aplikujte čisticí roztok na všechny povrchy
3. Opláchněte povrchy pod tekoucí vodou

Dezinfekce : Použít dezinfekční prostředek v souladu s instrukcemi na etiketě. Doporučuje se čištění nástroje jednorázovým hadříkem a roztokem s rychlou účinností (typ FD322 – DÜRR DENTAL), a nechat je ponořené do roztoku antibakteriálního dezinfekčního prostředku (typ Peroxil nebo Vircon) po dobu **10** minut.

Sušení: Když je sušení součástí mycího a dezinfekčního cyklu, nepřekračujte 121 ° C u pryžových/plastových špiček a 134 ° C u kroužků.

Údržba: Nejsou žádné podrobnosti požadavky.

Inspekce a provozní zkoušky: Všechny nástroje: provést vizuální kontrolu pro zjištění poškození a známky opotřebení; vyhodit gumové špičky jakkoliv zlomené nebo opotřebované

Balení: Individuální: může se použít běžný obal.

Hromadné balení: nástroje vložit do určených kazet na nástroje, nebo na tácky určené pro sterilizaci. Gumové špičky v nádobách, které zamezují jejich vypadání.

Zabalte podnosy vhodným způsobem.

Sterilizace: V autoklávu (ISO17665). Rychlý cyklus: Kovové rukojeti: **3** min při **134** °C; Gumové/plastové hroty: **15** min. při **121** °C.

Uchování: Nejsou žádné specifické požadavky, ani omezení týkající se doby trvání nebo podmínek skladování.

Další informace: Dávejte pozor, abyste nepřekročili maximální limit naplnění sterilizačního přístroje.

Kontakt na výrobce: Viz brožuru, kde je k nalezení telefonní číslo a adresa, případně na místního zástupce, popř. volejte číslo (+39) 0185 7887870.

Výše uvedené instrukce byly ověřené výrobcem zdravotnického prostředku a shledány jako SCHOPNÉ pro přípravu nástrojů k opakovanému použití. Je zodpovědností osoby provádějící proces pro opakované použití, a zajistit, aby byly použity správné přístroje a postupy k docílení požadovaných výsledků. Všechny procesy musí být systematicky ověřovány a všechny odchylky evidovány, aby bylo možné zhodnotit účinnost procesů a případně najít nežádoucí následky.

MICERIUM SpA Via G. Marconi 83 - 16036 - Avegno (GE) Itálie - [http:// www.micerium.it](http://www.micerium.it)

Fax: +39-0185-7887970 - Tel. +39-0185-77887870 - e-mail: hfo@micerium.it

Přímá mezinárodní linka: Tel. +39-0185-77887880 - e-mail: hfo@micerium.it

