

KIT MOCK UP – PRO VÝROBU PROVIZORNÍCH FAZET

Temp Silic Mock-up je efektivní komunikační prostředek mezi zubařem, pacientem a zubní laboratoří, neboť umožňuje vyrobit mock-up přímo v ústech pacienta pomocí vysoce naplněného flow kompozitu Enamel Plus HRi Flow. Kompozit vykazuje jedinečné fyzikální a estetické vlastnosti.

Výhody:

- * otisk silikonovou hmotou v transparentní otiskovací lžici = 45 sekund
- * vytvrzení otiskovací hmoty – 1 min. 30 sekund
- * preparace na fasetu
- * nanesení HRi Flow do průsvitného silikonu – 30 sekund
- * vytvrzení světlem – 60 sekund
- * závěrečná polymerace s EnaSealem – 60 sekund
- * leštění diamantovými pastami – 60 sekund

Enamel Plus HRi Flow

- vysoce naplněný – 77 % hmotnosti
- vysoce fluorescentní
- vysoce viskózní
- vysoce radiopákní
- vysoké fyzikální vlastnosti

MOCK-UP KIT PRO DOČASNÉ FAZETY OBSAHUJE:

Temp Silic transparentní silikonová hmota, 2 x 50 ml

Míchací kanyly, 8 ks

Průsvitná lžice pro frontální úsek, 2 ks

Průsvitná lžice pro horní čelist, 2 ks

Průsvitná lžice pro dolní čelist, 2 ks

Flow HRi UD 0,5 – 2 g

Flow HRi UD2 – 2 g

Flow HRi UD3 – 2 g

Ena Seal – 2,5 ml

NÁVOD K POUŽITÍ SETU:

Fáze I. – Mock up (pro modifikaci tvaru)



voskování



otisk silikonovou hmotou
v transp. otiskovací lžici – 45 s



vytvrzení otiskovací hmoty
1 min 30 s



nanesení Flow HRI do
průsvitného silikonu



vytvrzení světlem - 60 s



mock up

Fáze II. – Dočasné fasety



preparace na fasetu



aplikace Ena Seal



nanesení FlowHRI do
průsvitného silikonu



dočasné fasety



trvalé fasety



konečný výsledek po leštění

* Enamel Plus HRI Flow viz návod k použití výrobce GDF



MICERIUM S.p.A.

Via G. Marconi, 83 - 16036 Avegno (GE)

Tel. (+ 39) 0185 7887 870 • Fax (+39) 0185 7887 970

e-mail: micerium@micerium.it • www.micerium.it



Distributor: Italdent s.r.o., Rousovická 623/2, 181 00 Praha 8, e-mail: info@italdent.cz
Tel: 233552022, Fax: 233551165, www.italdent.cz