


Smile Lite MDP2

Connected Handle (bluetooth) - Připojená rukojeť (bluetooth)

INSTRUCTION FOR USE - NÁVOD NA POUŽITÍ

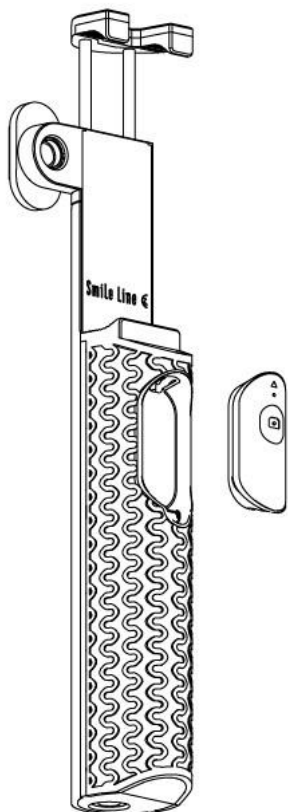


Item N°6713

Smile Line ☺

Smile Lite MDP2

Connected Handle (bluetooth) - Připojená rukojeť (bluetooth)

INSTRUCTION FOR USE - NÁVOD NA POUŽITÍ

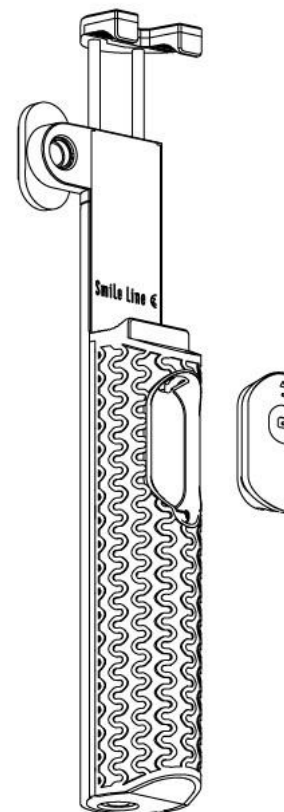

Item N°6713

Smile Line ☺

CS



NAINSTALUJTE BATERII DO MODULU BLUETOOTH

- 1 – Vyjměte Bluetooth z rukojeti
- 2 – Držte modul Bluetooth pevně mezi palcem a ukazováčkem
- 3 – Nehtem palce druhé ruky odepněte víčko od spodní části
- 4 – Vložte baterii (dodávaná u výrobku)
- 5 – Ujistěte se, že je baterie dobře vložena do spodní části/základny
a zavřete víčko klipem

FUNKCE – uvedení do provozu

- 1 – Tisknout tlačítko po dobu 5“ – modré led světlo se rozsvítí
- 2 – Zvolte v Nastavení ve vašem telefonu – Bluetooth
- 3 – Klikněte na „Smile Line“
- 4 – Potvrďte spárování obou zařízení

Vaše připojená rukojeť je připravena k činnosti. Od této chvíle můžete držet MDP2 a současně mačkat spoušť stejnou rukou.

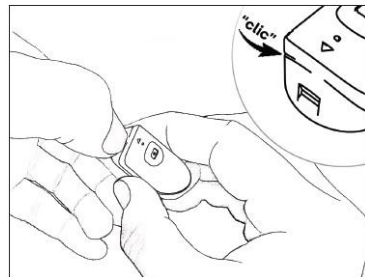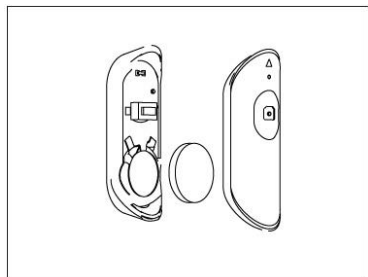

CS

NAINSTALUJTE BATERII DO MODULU BLUETOOTH

- 1 – Vyjměte Bluetooth z rukojeti
- 2 – Držte modul Bluetooth pevně mezi palcem a ukazováčkem
- 3 – Nehtem palce druhé ruky odepněte víčko do spodní části
- 4 – Vložte baterii (dodávaná u výrobku)
- 5 – Ujistěte se, že je baterie dobře vložena do spodní části/základny
a zavřete víčko klipem

FUNKCE – uvedení do provozu

- 1 – Tisknout tlačítko po dobu 5“ – modré led světlo se rozsvítí
- 2 – Zvolte v Nastavení ve vašem telefonu – Bluetooth
- 3 – Klikněte na „Smile Line“
- 4 – Potvrďte spárování obou zařízení

Vaše připojená rukojeť je připravena k činnosti. Od této chvíle můžete držet MDP2 a současně mačkat spoušť stejnou rukou.

