

SL silver line Gel

s konopným extraktem, aloe,
koloidním stříbrem (10 ppm)



INDIKACE

- >> Afty, vředy, recidivující aftózní stomatitida, gingivitida, paradentóza
- >> Mukositida po radioterapii a chemoterapii
- >> Stomatochirurgie, komplikace po obtížných extrakcích zubů
- >> Implantologie
- >> Traumatické vředy a poranění od zubních protéz a ortodontických aparátů
- >> Syndrom pálení v ústech

Vlastnosti

- >> Přilne k ústní sliznici a nestéká
- >> Vytváří ochranný film
- >> Koncentrované složení s koloidním stříbrem (10 ppm), antibakteriální, antivirový účinek, pH neutrální
- >> Na bázi konopného extraktu, aloe, kyseliny hyaluronové a vitamínu E
- >> Neobsahuje fluoridy, cukry, matující látky, alkohol, dochucovadla, ropné deriváty, silikony a parabeny

Benefity

- >> Poskytuje rychlou úlevu
- >> Eliminuje pocit pálení
- >> Chrání ústní sliznici
- >> Díky své antioxidační funkci zajišťuje pohodu a hygienu úst

GEL KOLOIDNÍHO STŘÍBRA

Přirozený antibakteriální antivirový účinek

ENA[®] CARE
Oral

ItalDent

Distributor pro ČR: ItalDent s.r.o.
Rousovická 623/2 - 181 00 Praha 8
Tel: +420 233 552 022 - GSM: +420 603 468 507
info@italdent.cz - www.italdent.cz

Micerium S.p.A.
Via Marconi 83, 16036 Avegno (GE) Italy
Tel: +39 0185 7887 870
sales@micerium.it

estetica
M
GRUPPO
MICERIUM


LÉČEBNÝ PROTOKOL

- U aftů, vředů a recidivujících aftózních stomatitid se pacientovi doporučuje aplikovat gel na postižená místa 2 krát až 3 krát denně po dobu asi jedné minuty bez oplachování.
- Při zánětech dásní a parodontóze se gel aplikuje po nechirurgické paro terapii a pacientovi se doporučuje používat gel 2 krát až 3 krát denně po dobu asi jedné minuty bez oplachování postižených oblastí.
- Gel koloidního stříbra dobře přilne k ústní sliznici a vytváří ochranný film, díky čemuž je ideální při ústní chirurgii a extrakcích zubů a doporučuje se pro aplikaci do jamek i přes stehy.
- V implantologii po operacích by se měl gel aplikovat po zavedení implantátu a po dokončení stehů.
- V případě traumatických vředů od snimatelných zubních protéz a ortodontických aparátů se pacientovi doporučuje aplikovat gel pod aparát v místě problematického kontaktu s dásní.
- U pacientů se syndromem pálení v ústech se doporučuje aplikovat gel 2 krát až 3 krát denně na celou vnitřní oblast úst po dobu přibližně 1 minuty bez vyplachování.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Gel koloidního stříbra se aplikuje pomocí speciálních injekčních stříkaček s jednorázovou aplikační kanylou, které usnadňují zavádění gelu do periodontálních kapes, do alveolu po dentálních avulzích a ve všech indikacích sliznice dutiny ústní. Stříkačky s kanylou umožňují větší přesnost při aplikaci a větší kontrolu dávkování. Doplnění stříkačky je snadné.

Afty

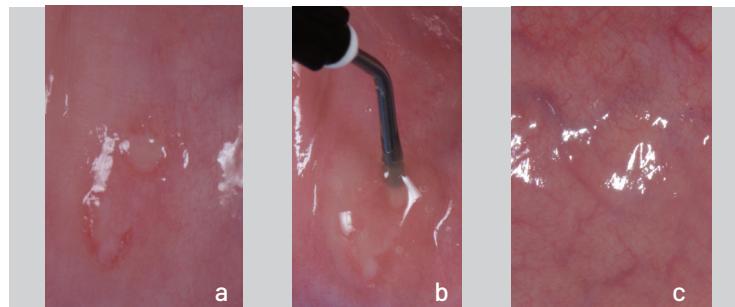

a) Klinický obraz afty - b) Aplikace silver gelu

c) Klinický obraz po ošetření, gel zklidňuje a urychluje hojení

Klinický případ




Klinicky a rentgenový obraz počátečního parodontického defektu

Aplikace gelu Silver Line



Klinický a rentgenový obraz po 12 měsících, povšimněte si regenerované kosti

Naplnění stříkačky

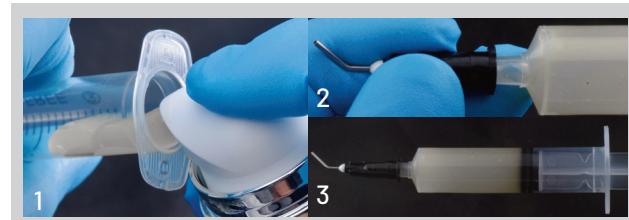

- 1) Vyjmout píst a naplnit gelem stříkačku
- 2) Adaptovat aplikační kanylu
- 3) Vložit zpět píst stříkačky

Balení:
ECSG50 | 50 ml | 490,-
ECSG150 | 3 x 50 ml | 1.260,-